

## Gwarancja zostaje udzielona na następujących warunkach:

1. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu
2. Okres gwarancji obejmuje bezpłatną naprawę w/w urządzenia w celu doprowadzenia go do ponownej używalności
3. Przedmiotem udzielonej gwarancji nie są:
  - a) uszkodzenia będące skutkiem klęsk żywiołowych, tj. pożaru, powodzi itp.
  - b) uszkodzenia wynikłe z celowego lub przypadkowego uderzenia, wstrząsu, zgniecenia lub innego działania mechanicznego
  - c) uszkodzenia wynikłego na skutek napraw, przeróbek, demontażu, montażu wykonanego samodzielnie przez nieupoważnione osoby
  - d) uszkodzenia wynikłe z przechowywania lub użytkowania niezgodnego z dołączoną instrukcją obsługi, ze stosowania materiałów nie zalecanych przez producenta, z powodu użytkowania urządzenia dla celów innych niż jego standardowe przeznaczenie
4. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne zużywane w trakcie normalnego użytkowania
5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź straty powstałe w wyniku niemożności użytkowania urządzenia
6. Gwarantowi reklamacje należy zgłosić osobiście, pisemnie lub mailowo niezwłocznie po zauważeniu usterki
7. Naprawy urządzenia dokonywane są w siedzibie udzielającego gwarancji. Towar przekazywany powinien być pozbawiony zanieczyszczeń.
8. Nabywca potwierdza akceptację powyższych warunków gwarancji oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasilanie 2 x bateria AA (R6) – brak w zestawie

1. Trzymając pęsetą tabletkę APIVAROLU odpalic ją za pomocą zapalniczki, a następnie położyć na metalową siatkę komina.
2. Wsunąć dyszę urządzenia do ula i je załączyć zatykając wlot ula dołączoną zatyczką. Spalenie tabletki trwa ok. 30 sekund.
3. Po spaleniu tabletki usunąć jej pozostałości i powtórzyć czynność przy kolejnym ulu.

**UWAGA! Tabletkę należy zapalać na zewnątrz urządzenia. Nie należy kierować bezpośredniego ognia na urządzenie**

Film instruktażowy dostępny na

[www.apiart.pl/drobny-sprzet/154-odymiacz-elektryczny.html](http://www.apiart.pl/drobny-sprzet/154-odymiacz-elektryczny.html)